

ROOTER®

# 3




www.fkg.ch





# ALTA VELOCITÀ FINO A 3000 giri/min

La velocità più elevata disponibile sul mercato per un motore endodontico cordless. Precisione e controllo con un solo tocco. La grande potenza, unita a un torque accurato e stabile, permette una preparazione efficiente del canale radicolare. Grazie alla rotazione uniforme si ottengono una minore rumorosità e un comfort maggiore per i pazienti.

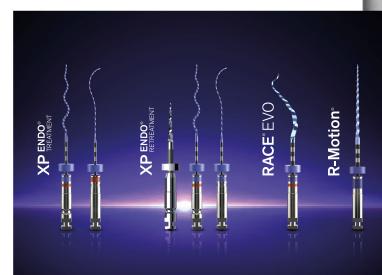

## PROGRAMMI PREIMPOSTATI Da FKG


L'adattabilità riflette la sua essenza, a partire dai quattro programmi preimpostati per strumenti FKG: XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO, e R-Motion®. Si tratta di un risparmio di tempo per gli endodontisti, che possono contare sulle raccomandazioni predefinite dal fabbricante per ogni tipo di strumento.

SCELTA FRA PIÙ DI 60 VELOCITÀ
FUNZIONI APICALI MULTIPLE
10 MEMORIE DISPONIBILI
4 MOVIMENTI DISPONIBILI CW / CCW / REC / ATR
FUNZIONE AUTO START/STOP

# LIBERTÀ DI IMPOSTAZIONE LASCIATA ALL'OPERATORE

Il motore endodontico fornisce 10 memorie programmabili dall'utente per tutte le modalità (EAL, CW, CCW, REC o ATR), rendendo così il Rooter® X3000 il dispositivo ideale, per risparmiare tempo e guadagnare in efficienza. Display regolabile per destrorsi e mancini.



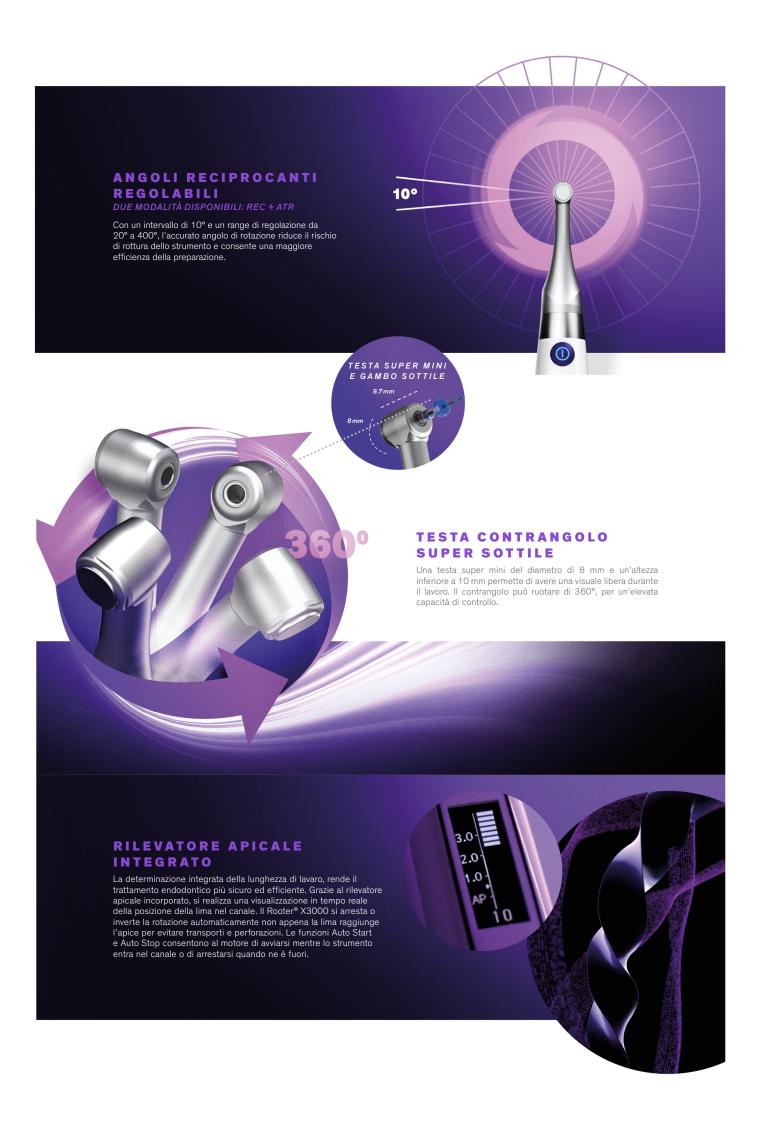



## RICARICA WIRELESS

Con il Rooter® X3000 e la sua capacità di carica wireless, non c'è bisogno di stare attenti al filo e i movimenti saranno più fluidi.



### **FUNZIONI APICALI**

Per aumentare la sicurezza per i pazienti e il controllo, sono disponibili 4 funzioni apicali:

SLOW DOWN: il motore rallenta a una velocità finale impostata quando la punta della lima si avvicina al punto di riferimento apicale.

STOP: il motore si arresta automaticamente quando lo strumento raggiunge il punto di riferimento, e poi si riavvia, sempre automaticamente, quando ne viene allontanata.

REVERSE: il motore inverte automaticamente il senso di rotazione quando lo strumento raggiunge il punto di riferimento. Torna poi automaticamente al senso di rotazione iniziale quando lo strumento viene allontanato dal punto di riferimento.

OFF: l'azione apicale è disabilitata.





Contrangolo girevole a 360°



Programmi preimpostati da FKG



Comoda ricarica wireless



Contrangolo 4.7:1



Batteria al litio 2000mAh




Centro di gravità frontale



Alta velocità fino a 3000 giri/min



Libertà di impostazione

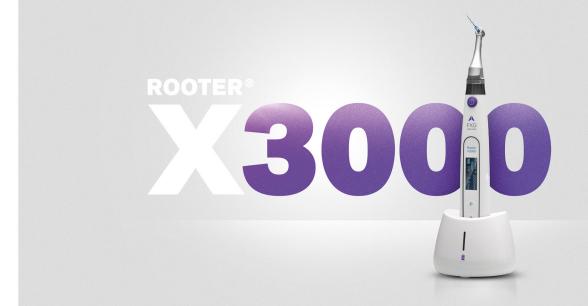







T +41 32 924 22 44 info@fkg.ch www.fkg.ch