


NEODIAMOND®

FRESE DIAMANTATE MONOPAZIENTE

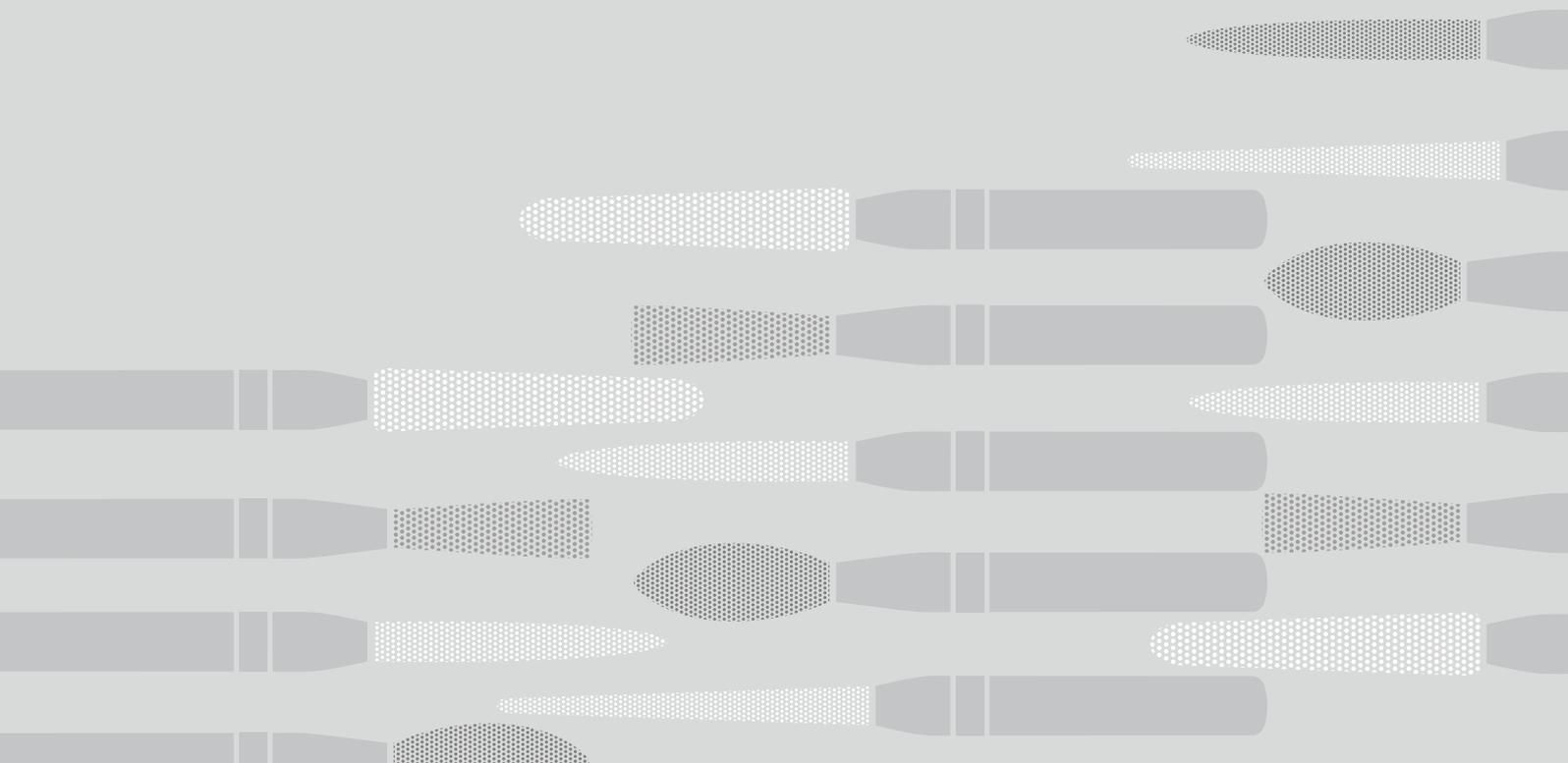

 **MICROCOPY**
INNOVATIONS FOR DENTISTRY

Distributore esclusivo

 **dental trey**

Frese diamantate monopaziente

Istruzioni per l'uso*

- Il dispositivo deve essere utilizzato, in base alle istruzioni, da un dentista o da un professionista autorizzato
- Indossare sempre guanti ogni volta che si maneggiano strumenti contaminati
- È necessario indossare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle rimosse
- È necessario indossare una mascherina chirurgica per evitare l'inhalazione di aerosol o di polvere generata
- Assicurarsi che la fresa sia stata inserita in modo sicuro nel mandrino del manipolo
- Non riutilizzare le frese
- Mantenere il manipolo in buon ordine e correttamente lubrificato
- Non applicare eccessiva pressione sulla fresa
- Estrarre la fresa con movimento parallelo al mandrino del manipolo per evitare flessioni e conseguente rottura della stessa

È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il confezionamento sia integro, a garanzia della sterilità del prodotto

Indicazione massimi giri al minuto

Diametro della testina dello strumento 01/10 (mm) - ISO	Velocità massima ammissibile (giri al minuto)	Velocità operativa raccomandata (giri al minuto)
007-010	450.000	100.000 - 220.000
012-014	450.000	70.000 - 220.000
016-018	450.000	55.000 - 160.000
021-023	300.000	40.000 - 120.000
025-027	160.000	35.000 - 110.000
029-031	140.000	30.000 - 95.000
033-040	120.000	25.000 - 75.000
042-050	95.000	15.000 - 60.000



Taglio più veloce, meno tempo alla poltrona

Dal 1970 Microcopy è impegnata nella progettazione e sviluppo di materiali con i più alti standard qualitativi in grado di aiutare i dentisti nell'applicazione di protocolli sicuri.

Qualità e risparmio di tempo

Maggior superficie di contatto della parte tagliente del diamante sul dente (20% in più rispetto alle frese di altre marche) per una rimozione più veloce e un maggiore risparmio di tempo. Gambo in acciaio inossidabile di alta qualità. Il diametro del gambo ha la più piccola tolleranza possibile (gambo 1,597 mm \pm .001/-0.005). Il colore impresso sul gambo identifica la misura della grana.

Sicurezza


Prestazioni sicure a ogni utilizzo per una maggior sicurezza del paziente. Igiene ottimale e controllo delle infezioni garantito: eliminato qualsiasi rischio di contaminazione crociata!

Convenienza

Elevata competitività economica: oltre al risparmio di tempo, grazie a una lavorazione più veloce, usare frese sterili Microcopy elimina i costi del processo di sterilizzazione (personale/attrezzature/materiali).

Confezionamento: scatola da 10 frese sterili, confezionate singolarmente.

Certificazione CE 93/42, FDA e ISO 13485:2012.

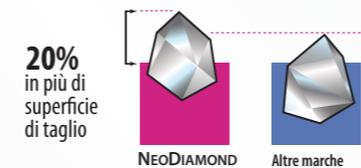

	Pallina 001 (801)								
ISO/Granulometria	009 ●	010 ●	012 ●	013 ●	014 ●	015 ●	016 ●	017 ●	018 ●
Codice	10048932	10048933	10048934	10049001	10048935	10049002	10048936	10049003	10048938

	Pallina con colletto 002 (802)			Cono rovescio 010 (805)					
ISO/Granulometria	018 ●	023 ●	025 ●	009 ●	012 ●	009 ●	010 ●	012 ●	014 ●
Codice	10048937	10049063	10049067	10049004	10048939	10048940	10048941	10048942	10048943

	Cono rovescio con colletto 019 (806)		Doppio cono 039 (811)	Cilindro punta piatta 108 (835)	Cilindro punta piatta 109 (835)			
ISO/Granulometria	016 ●	009 ●	012 ●	037 ●	010 ●	009 ●	009 short ●	010 ●
Codice	10048944	10049005	10048945	10049073	10048946	10049006	10049007	10048947

	Cilindro punta piatta 110 (836)			Cilindro punta piatta 111 (837)		
ISO/Granulometria	012 ●	014 ●	016 ●	012 ●	014 ●	014 ●
Codice	10048948	10048949	10048950	10048951	10048952	10048953

	Cilindro a punta 129 (884)	Cilindro a punta 131 (886)	Cilindro a punta arrotondata 139 (838)	Cilindro a punta arrotondata 140 (880)		Cilindro a punta arrotondata 141 (881)		
ISO/Granulometria	012 ●	016 ●	010 ●	010 short ●	012 ●	014 ●	014 ●	014 ●
Codice	10049008	10049009	10049010	10049011	10049012	10049013	10049014	10048956

	Cilindro punta tonda 142 (882)	Cilindro punta piatta diamantata 150 (839)	Cilindro bordo arrotondato 157 (836KR)			Cilindro bordo arrotondato 158 (837KR)		
ISO/Granulometria	016 ●	012 ●	011 ●	009 ●	011 ●	013 ●	012 ●	014 ●
Codice	10049015	10049016	10049068	10049017	10049018	10049019	10049020	10049021

	Cono a punta 164 (852)		Cono a punta 165 (858)				Cono a punta 166 (859)			
ISO/Granulometria	014 ●	015 ●	010 ●	011 ●	012 ●	014 ●	014 ●	014 ●	015 ●	016 ●
Codice	10049022	10049023	10049024	10049025	10049026	10048957	10048959	10049027	10048958	10049028

	Cono a punta 167 (859L)				Cono testa piatta 170 (845)	Cono punta piatta 171 (846)	Cono punta piatta 172 (847)		
ISO/Granulometria	011 ●	011 ●	012 ●	012 ●	012 ●	014 ●	012 ●	016 ●	023 ●
Codice	10049030	10049029	10048961	10048960	10049031	10048962	10048963	10048964	10049069

	Cono punta piatta 173 (848)			Cono punta arrotondata 197 (855)			Cono punta arrotondata 198 (856)		
ISO/Granulometria	016 ●	016 ●		012 ●	016 ●	025 ●	016 ●	018 ●	019 ●
Codice	10048966	10048965		10048967	10048968	10049070	10048969	10048970	10048971

	Cono punta arrotondata 199 (850)				Cono punta non lavorante 219		
ISO/Granulometria	012 ●	016 ●	016 ●	018 ●	012 ●	016 ●	017 ●
Codice	10048972	10048974	10048973	10048975	10048928	10048929	10048931

	Cono punta non lavorante 220	Cono rovescio 225 (807)	Pera 234 (830L)			Pera 237 (830R)			
ISO/Granulometria	016 ●	012 ●	012 ●	013 ●	014 ●	010 ●	012 ●	016 ●	018 ●
Codice	10048930	10049032	10048976	10049033	10049034	10048977	10048978	10048979	10048980

	Pera 238 (830RL)			Fiamma 247 (860)			Fiamma 248 (861)		
ISO/Granulometria	012 ●	014 ●		012 ●	012 ●	014 ●	011 ●	012 ●	012 ●
Codice	10048981	10048982		10048984	10048983	10048985	10050161	10048986	10049037

	Fiamma 249 (862)				Fiamma 250 (863)				
ISO/Granulometria	010 ●	014 ●	016 ●	016 ●	011 ●	012 ●	014 ●	016 ●	018 ●
Codice	10048987	10048988	10048990	10048989	10049038	10048991	10048992	10049039	10049040

	Football 257 (368)						Ovoidale 277 (379)		
ISO/Granulometria	014 ●	018 ●	021 ●	022 ●	023 ●	023 ●	018 ●	022 ●	023 ●
Codice	10049042	10048993	10049059	10049060	10049065	10049064	10049043	10049061	10049066

	Torpedo conica 289 (878)					Torpedo 290 (879)		Chamfer conico 298 (878K)	
ISO/Granulometria	010 ●	012 ●	012 ●	014 ●	016 ●	012 ●	014 ●	012 ●	014 ●
Codice	10049044	10048995	10048994	10048996	10048997	10048998	10048999	10049045	10049046

	Chamfer conico 299 (879K)				Lenticolare 304 (825)	Cilindro spiralato 513			
ISO/Granulometria	016 ●	016 ●	018 ●	021 ●	015 ●	016 short ●			
Codice	10049048	10049047	10049049	10049062	10049050	10049051	10049052	10049053	10049054

	Cono spiralato 521	Fiamma collo lungo 539 (883)	Fiamma collo lungo 540 (889)			Cono punta arrotondata 545 (846KR)	Pallina collo lungo 697 (801L)		
ISO/Granulometria	020 short ●	010 ●	008 ●	009 ●	010 ●	015 ●	014 ●	016 ●	018 ●
Codice	10049055	10048926	10048924	10048927	10048925	10049056	10049057	10049000	10049058

Riconoscimenti



Dental Advisor
Top Bur-Diamond
(2014, 2015, 2017, 2018)




Dental Choice
Townie Choice Awards
(2010, 2011, 2012, 2016, 2017)



Dental Product Shopper
Best Product (2017)



Fondazione indipendente
non-profit per la
formazione odontoiatrica
e il test dei prodotti
Prodotti più votati

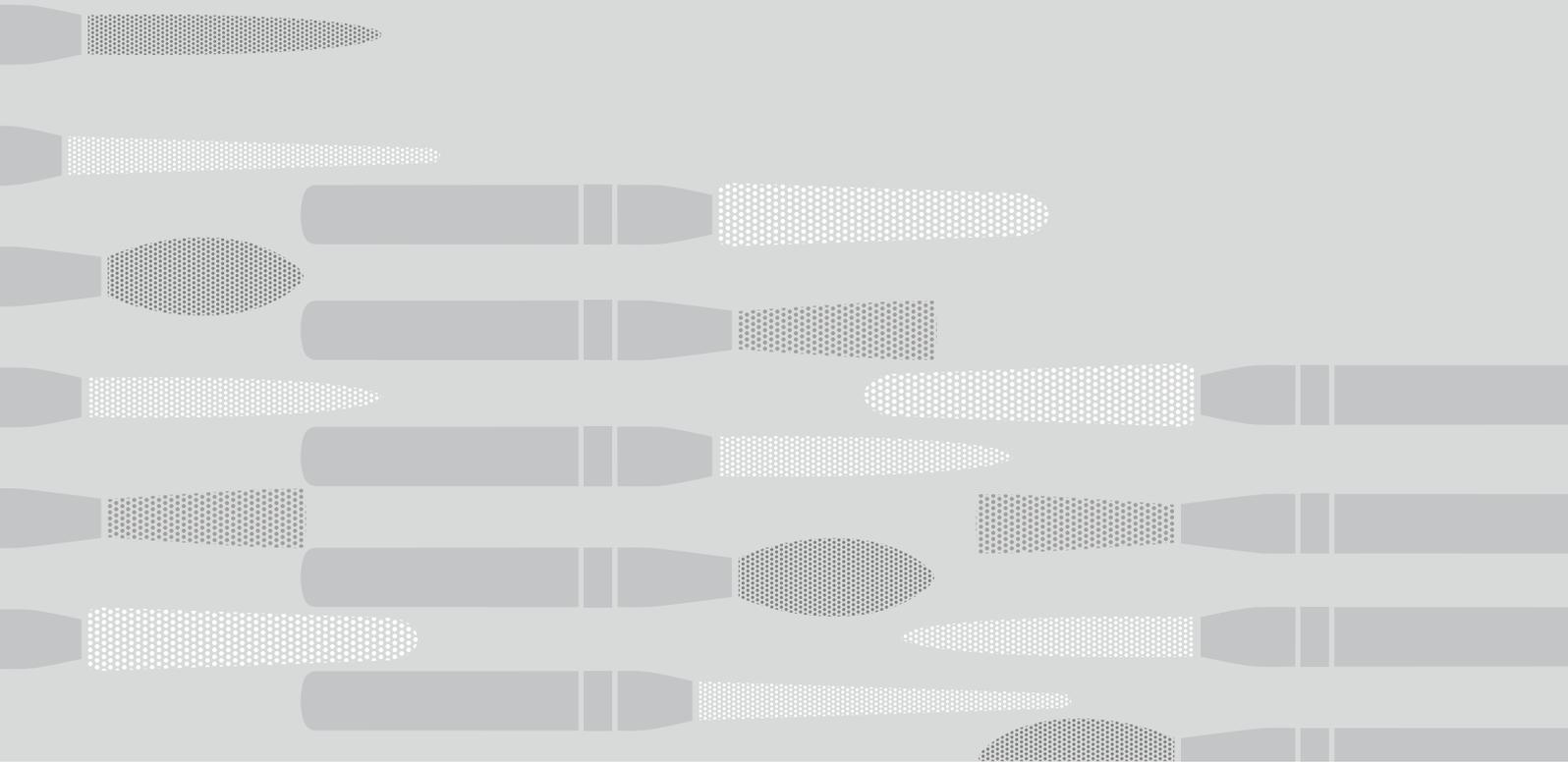

Dental Trey srl - Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC), Italia - T +39 0543 929111, F +39 0543 940659 - commerciale@dentaltray.it - www.dentaltray.it



REV00 06/2018