



METODO D'UTILIZZO:

Posizionare Comfort-In esclusivamente su gengiva aderente e mucosa palatale per evitare che l'alta velocità d'infusione possa danneggiare la mucosa. Comfort-In può essere utilizzato su pazienti con dentizione permanente e/o dentizione decidua.

Protocollo:

0,3 ml (solo sulla zona mentoniera la dose sarà di 0,2ml).

I test effettuati hanno dimostrato che, utilizzando il sistema Comfort-In, il periodo di dispersione dell'anestetico è considerevolmente minore rispetto ad una tradizionale infusione. L'effetto dell'anestesia è quasi immediato, le dosi necessarie considerevolmente inferiori ed i rischi di eventuali effetti collaterali ridotti.

STEP BY STEP – i 7 passaggi fondamentali

1 Caricare il dispositivo con l'apposito strumento



2 Riempire il nozzle utilizzando l'adattatore collegato alla tubofiala (**premere lo stantuffo sino ad avvertire un leggero "click", in modo da rimuovere il blocco**)



3 Selezionare, sulla scala graduata del device, il volume di farmaco che desideriamo infondere. **Questa fase si dovrà eseguire *solamente* dopo l'avvenuta ricarica del device.** Viceversa, la molla interna potrebbe essere soggetta a danneggiamento.



4 Avvitare leggermente il device in senso antiorario fino alla fuoriuscita della prima goccia.

Questa operazione è fondamentale per portare "a battuta" lo stantuffo del nozzle con il pistone del Comfort-in e evitare fastidio al paziente.



5 Posizionare adattatore giallo sul nozzle
CAP01 (retto) infusioni vestibolari, linguali e palatali posteriori
CAP02 (curvo) infusioni palatali anteriori (canino - canino)



6 Posizionare il device sempre perpendicolarmente (angolo 90°) rispetto al sito d'infusione, solo su GENGIVA ADERENTE,



7 Attendere 2/3 secondi tenendo fermo in posizione il dispositivo dopo l'infusione