

## Sequenza XP-endo® Shaper Plus



Confezione da 4 strumenti per blister (1 sequenza)

21 mm: S1.XB0.00.SAC.FK  
25 mm: S1.XB0.00.SAD.FK

## Sequenza XP-endo® Shaper



Confezione da 6 strumenti per blister (2 sequenze)

21 mm: S1.XB0.00.SAA.FK  
25 mm: S1.XB0.00.SAB.FK

## Ricambio XP-endo® Shaper



Confezione da 6 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AF.FK  
25 mm: S1.XB0.00.0AG.FK  
31 mm: S1.XB0.00.0AH.FK



Confezione da 3 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AJ.FK  
25 mm: S1.XB0.00.0AK.FK  
31 mm: S1.XB0.00.0AL.FK

## Ricambio XP-endo® Finisher



Confezione da 3 strumenti per blister

21 mm: S1.XB0.00.0AC.FK  
25 mm: S1.XB0.00.0AA.FK



## FKG Dentaire SA

FKG Dentaire SA, società svizzera fondata nel 1931, ha acquisito nuovo slancio nel 1994, quando Jean-Claude Rouiller ha preso le redini dell'azienda, portandola all'avanguardia nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti odontoiatrici destinati a dentisti e laboratori.

La strategia di FKG è incentrata su prodotti innovativi e di alta precisione e sulla progettazione di strumenti appositamente rivolti al mondo dentistico, al fine di offrire soluzioni in grado di soddisfare le esigenze più severe degli utenti.

Nel 2011, Thierry, figlio di Jean-Claude Rouiller, ha assunto la direzione di FKG. Grazie al suo impulso, la rete di distributori si è notevolmente sviluppata e ha permesso a FKG di rendere i suoi prodotti disponibili e presenti in un centinaio di paesi in tutto il mondo.

Nel 2012 il Swiss Venture Club ha premiato FKG per il suo dinamismo, l'alta qualità dei suoi prodotti e la continua innovazione.

Dotata dal 2013 di una camera bianca, FKG Dentaire sviluppa una propria gamma di prodotti sterili.

Tra il 2013 e 2014 sono stati inaugurati a La Chaux-de-Fonds, Dubai e Oslo centri di formazione con infrastrutture all'avanguardia.

L'azienda è certificata conformemente alle norme e ai regolamenti internazionali in vigore.



**FKG Dentaire SA**

Crêt-du-Loche 4  
CH-2304 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland

T +41 32 924 22 44  
F +41 32 924 22 55  
info@fkg.ch  
www.fkg.ch



**Distributore: Dental Trey srl**

Via Partisani, 3  
47016 Fiumana - Predappio (FC)  
Italia

T +39 0543 929111  
F +39 0543 940659  
commerciale@dental Trey.it  
www.dental Trey.it



2017-03 - © FKG Dentaire SA  
Pictures of our products are not contractual



IT


## 3D Generation

XP-endo® Shaper - sequenza

## Limiti degli strumenti Ni-Ti tradizionali

Malgrado la necessità di trattamenti meno invasivi, quelli eseguiti con le lime endodontiche tradizionali possono andare incontro a fallimenti a causa di:

- Torque eccessivo
- Mancanza di flessibilità
- Preparazione incompleta del canale radicolare (forma rotonda)
- Eccessiva rimozione di tessuto dentinale sano
- Eccessiva sollecitazione dovuta al taglio delle pareti interne
- Compattamento dei frammenti

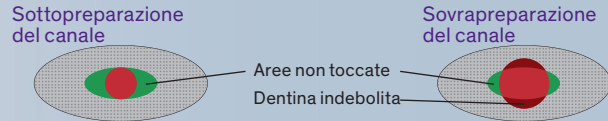


**Da oggi non è più necessario che il canale sia conforme a una dimensione prestabilita: saranno le dimensioni dello strumento XP-endo® ad adeguarsi all'anatomia del canale!**

## Con la tecnologia XP-endo® la strumentazione del canale radicolare può essere realmente mini-invasiva e anatomica


L'esclusivo abbinamento tra la tecnologia MaxWire®, che rende gli strumenti più efficienti quando sono esposti alla temperatura corporea, e il design tridimensionale dello strumento, con una sezione interna ridotta e adattabile all'anatomia del canale radicolare, permette di sagomare e detergere il canale in modo impeccabile.

Strumento convenzionale

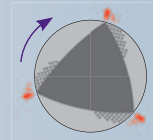

Compattamento dei frammenti  
Stress elevato

Strumento XP-endo

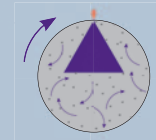

Nessun compattamento dei frammenti  
Riduzione dello stress

## Caratteristiche e benefici

- Superelasticità e capacità di espansione
- Elevata resistenza alla fatica ciclica
- Eccellente rimozione dei residui radicolari
- Adattamento alle irregolarità del canale
- Trattamento conservativo non aggressivo

# Sequenza XP-endo® Shaper Plus

La sequenza XP-endo® Shaper Plus permette di eseguire una strumentazione completa del canale radicolare con la massima sicurezza ed efficienza.

- Operatività semplificata: gli strumenti sono confezionati in blister sterile per uso singolo (ogni strumento può essere utilizzato per la pulizia di un solo elemento dentale e non più di 4 canali)
- Deterzione tridimensionale del canale radicolare: XP-endo® Shaper allarga il canale rispettandone la morfologia originale
- Capacità di sagomatura da ISO 15 a ISO 30 (punta BT) e conicità da .01 fino ad almeno .04 (MaxWire®), con un unico strumento
- Rimozione del biofilm: XP-endo® Finisher, grazie alla sua esclusiva capacità di espansione, riesce a detergere il canale anche nelle zone finora impossibili da raggiungere
- Irrigazione e deterzione superiori senza alterare la morfologia finale

## Glide path



10/02

15/02

## Sagomatura



30/04

## Deterzione



25/00



XP ENDO®  
*shaper*

XP ENDO®  
*finisher*



## Sequenza XP-endo® Shaper

- Due sequenze confezionate in blister sterile
- Estrema maneggevolezza
- La successiva detersione con XP-endo® Finisher è facoltativa

### Glide path



### Sagomatura



**XP ENDO®**  
*shaper*