

A. Uso

Le presenti istruzioni per l'uso devono essere utilizzate in abbinamento con le informazioni specifiche riportate sull'imballaggio o al suo interno. Questi guanti sono destinati ad essere utilizzati una sola volta e devono essere smaltiti in modo regolare. I guanti sono impermeabili e possono quindi essere utilizzati per proteggere la mano da piccole proiezioni e/o spruzzi di alcune sostanze chimiche. Soddiscano le disposizioni e i requisiti di marcatura della Direttiva Europea 89/686/CEE e successive modifiche. Sono inoltre conformi alle norme europee (EN) applicabili. Accertarsi che i guanti vengano utilizzati solo per l'uso al quale sono destinati. I guanti sono disponibili nelle seguenti taglie: 5 ½, 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½ e 9.

Spiegazione dei pittogrammi che, se applicabili, sono apposti sull'imballaggio:

 ABCD EN 388: 2003 Protezione contro i rischi meccanici	A. Resistenza all'abrasione B. Resistenza al taglio C. Resistenza allo strappo D. Resistenza alla perforazione	 ABCDEFGHIJKL EN 374: 2003 Guanto resistente alle sostanze chimiche	A = metanolo B = acetone C = acetonitrile D = diclorometano E = disolfuro di carbonio F = toluene G = dietilammina H = tetraidrofurfano I = etilacetato J = n-epilano K = idrossido di sodio, 40% L = acido solforico, 96%	 EN 374-3: 2003 (AQL ≤ 1.5) Protezione contro i microrganismi	 EN 374-2: 2003 Bassa protezione chimica. Tempi di permeazione disponibili su richiesta.
---	---	---	---	--	---

Quadro generale pittogrammi

	EN420	EN374	EN388	Presenza di lattice naturale		EN420	EN374	EN388	Presenza di lattice naturale
ENCORE® Latex Textured			Testato	SI	GAMMEX® Latex Sensitive			Testato	SI
ENCORE® Latex Micro			Testato	SI	GAMMEX® Latex Micro			Testato	SI
ENCORE® Latex Ortho			Conforme: 0010	SI	GAMMEX® Latex HyGrip			Testato	SI
ENCORE® Non-Latex			Testato	No	GAMMEX® Non-Latex			Testato	No
ENCORE® Non-Latex PI Underglove			Testato	No	GAMMEX® Non-Latex Sensitive			Testato	No
GAMMEX® Latex Ortho	Conforme	Conforme	Conforme: 0010	SI	GAMMEX® Non-Latex Underglove	Conforme	Conforme	Testato	No
GAMMEX® Latex			Testato	SI	GAMMEX® Non-Latex PI			Testato	No
GAMMEX® Latex Moisturizing			Testato	SI	GAMMEX® Non-Latex PI Micro			Testato	No
GAMMEX® Latex Underglove			Testato	SI	GAMMEX® Non-Latex PI Underglove			Testato	No



- Dispositivo medico di classe IIa ai sensi della direttiva relativa ai dispositivi medici (DDM) 93/42/CEE
- Dispositivo di protezione individuale (DPI) Categoria III/Disegno complesso ai sensi della direttiva DPI 89/686/CEE

Attenzione! Le informazioni riportate nei pittogrammi o i dati relativi ai tempi di permeazione chimica si basano su prove di laboratorio e sono quindi da considerarsi esclusivamente a livello indicativo, in quanto non riflettono necessariamente l'effettiva durata sul posto di lavoro.

La certificazione CE è disponibile presso BSI (I.D. 0086), BSI Group, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, United Kingdom. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dei guanti e per ottenere una copia della Dichiarazione di Conformità, contattare Ansell.

B. Precauzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, controllare attentamente i guanti per accertare l'assenza di difetti o imperfezioni. Se i guanti si strappano o si forano durante l'uso, toglierli e buttarli immediatamente. In caso di dubbio non utilizzare i guanti e prenderne un nuovo paio. 2. Se i guanti vengono utilizzati con sostanze chimiche è fondamentale evitare il contatto di qualsiasi sostanza chimica con la pelle, anche se tale sostanza è considerata innocua. Utilizzare solamente guanti che offrano un indice di protezione 6 o con un ottimo indice di degradazione. In tutti gli altri casi, i guanti vanno utilizzati solo per proteggersi da proiezioni e/o spruzzi o per contatti di breve durata. Accertarsi che i prodotti chimici non possano infiltrarsi nel guanto dal polsino. Per ulteriori informazioni sull'idoneità chimica, contattare il Servizio Tecnico di Ansell. 3. Evitare di portare guanti che sono sporchi all'interno: irritano la pelle, provocando dermatiti o danni peggiori. 4. I guanti contaminati vanno puliti o lavati prima di essere tolti dalla mano. 5. Questi guanti non vanno utilizzati in applicazioni che richiedano una protezione termica.

C. Composizione / Ingredienti pericolosi

Alcuni guanti possono contenere componenti noti come possibile causa di allergie nei soggetti con sensibilità ad essi. Questi possono sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. Qualora si verificasse una manifestazione allergica, contattare immediatamente il medico. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico di Ansell. Alcuni prodotti contengono lattice naturale, che può essere causa di reazioni allergiche, comprese reazioni anafilattiche.

D. Istruzioni per la cura dei guanti

Conservazione: Non esporre alla luce diretta del sole; conservare in un locale fresco ed asciutto.

Tenere lontano da fonti di ozono o fiamma viva.

Pulizia: Questi guanti non prevedono il lavaggio.

E. Smaltimento

I guanti usati possono essere contaminati da agenti infettivi o altri materiali pericolosi. Si prega quindi di procedere alla loro eliminazione in conformità con le vigenti normative locali in materia. Eliminare in discarica o incenerire in condizioni controllate.

Per individuare questi prodotti, fare riferimento alla tabella precedente o all'imballaggio.