

IL SISTEMA PROFESSIONALE
DI SBIANCAMENTO
DOMICILIARE

**IL SEGRETO
DI UNO SPLENDIDO SORRISO**



T R A N S F O R M I N G S M I L E S W O R L D W I D E





UN'OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER IL TUO STUDIO

C O N W H I T E D E N T A L B E A U T Y

I tuoi pazienti ti scelgono per ricevere prestazioni e servizi eccellenti.
Utilizzare prodotti affidabili ti permette di soddisfare le loro aspettative.
I gel White Dental Beauty sono formulati e confezionati pensando ai tuoi pazienti,
fornendoti ciò di cui hai bisogno per offrire un trattamento sbiancante efficace.



PERCHÉ USARE WHITE DENTAL BEAUTY ?

- I GEL WHITE DENTAL BEAUTY CONTENGONO **NOVON®** FORMULA AVANZATA PER IL MASSIMO EFFETTO SBIANCANTE**
- FORMULA ATTIVA PER TRATTARE LA SENSIBILITÀ DENTALE
- SBIANCAMENTO DENTALE DIMOSTRATO, EFFICACE E PREVEDIBILE
- SBIANCAMENTO VISIBILE IN MENO DI UNA SETTIMANA
- DISPONIBILE IN 4 DIVERSE CONCENTRAZIONI PER LE DIVERSE ESIGENZE DEI PAZIENTI**
- DISPONIBILE IN VERSIONE MILD PER CHI HA DENTI SENSIBILI
- ALTO CONTENUTO D'ACQUA PER EVITARE LA DISIDRATAZIONE E MIGLIORARE LA STABILITÀ DEL COLORE
- CONFEZIONAMENTO ECOLOGICO PER RIDURRE L'IMPRONTA DI CARBONIO
- DESIGN CONTEMPORANEO E ACCATTIVANTE PER STIMOLARE I PAZIENTI
- PERSONALIZZAZIONE CON IL MARCHIO DELLO STUDIO E SUPPORTO COMPLETO PER IL MARKETING

** 6%HP - LA PIÙ ALTA PERCENTUALE DI PEROSSIDO PROFESSIONALE DISPONIBILE

6% HP **16%** CP **10%** CP **5%** CP - MILD PER DENTI SENSIBILI

INCO

Il perossido di idrogeno è un agente sbiancante efficace. Lo ione perossidrile, prodotto dalla dissociazione del perossido di idrogeno, attiva il processo di sbiancamento. La dissociazione del perossido di idrogeno avviene molto più facilmente in ambiente alcalino.

NOVON[®], l'ingrediente attivo dei gel White Dental Beauty, presenta una innovativa caratteristica: rimane stabile (pH neutro) nel suo stato originario, ma diluito con acqua (in ambiente umido) provoca un rapido aumento del pH che, passando da neutro ad alcalino, libera una maggiore quantità di ioni perossidrile potenziando l'effetto sbiancante.

La formula esclusiva di NOVON[®] conferisce al gel White Dental Beauty una proprietà sbiancante accelerata senza paragoni, sicura, efficace e delicata.

NOVON[®] è una tecnologia esclusiva e brevettata (brevetto USA n° 8815217 B2) con caratteristiche sbiancanti superiori.



NOVON[®]





OFFRI UNA SCELTA AI TUOI PAZIENTI

6% **PEROSSIDO DI IDROGENO**
30 - 90 MINUTI



16% **PEROSSIDO DI CARBAMMIDE**
1- 2 ORE



10% **PEROSSIDO DI CARBAMMIDE**
2 - 4 ORE (INDOSSABILE DI NOTTE)



5% **PEROSSIDO DI CARBAMMIDE MILD**
*2 - 4 ORE (INDOSSABILE DI NOTTE)

*La durata dell'intero trattamento viene prescritta dal dentista.



WHITE
DENTAL
BEAUTY

mild

MILD 5%CP

White Dental Beauty Mild è un gel sbiancante delicato e sicuro, ideato per sbiancare i denti ipersensibili.

La formula esclusiva di White Dental Beauty Mild al 5% di perossido di carbammide, che contiene NOVON®, produce gli stessi risultati di sbiancamento di un gel al 10% di perossido di carbammide applicato 2 ore al giorno, ma presenta in generale meno problemi di sensibilità.*

NOVON® è una tecnologia esclusiva e brevettata (brevetto USA n° 8815217 B2) che produce un effetto sbiancante superiore.

White Dental Beauty Mild è il trattamento ideale per i pazienti che soffrono di denti sensibili.

* come indicato da studi indipendenti;

Con White Dental Beauty Mild 5% CP si sono ottenute le stesse tonalità di bianco possibili con un gel della concorrenza avente il 10% di perossido di carbammide. Utilizzando White Dental Beauty Mild 5% CP, si è registrata una sensibilità inferiore subito dopo il trattamento, confronto a un gel della concorrenza avente il 10% di perossido di carbammide. La sensibilità registrata dopo un periodo di 3 mesi è risultata la stessa con entrambi i prodotti. (Studi in corso di svolgimento).

Studi indipendenti effettuati 2 ore al giorno per 2 settimane.





PERSONALIZZAZIONE DEL MARCHIO

Ottimizza il potenziale di marketing e presenta ai tuoi pazienti trattamenti con il tuo marchio.

Approfitta di questa opportunità per personalizzare i tuoi kit e aggiungere il tuo logo!

White Dental Beauty ti mette a disposizione eleganti bag con manici di corda, per offrire ai pazienti un'esperienza d'acquisto da boutique.

PRODOTTI SBIANCANTI

Kit siringhe **4 x 3 ml**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO
10% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
16% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE

Kit siringhe **8 x 1,2 ml**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO
10% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
16% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
5% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE MILD

Confezione ricambi **40 x 1,2 ml**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO
10% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
16% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE

Confezione ricambi **20 x 3 ml**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO
10% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
16% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE

Siringhe **2 x 3 ml**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO
10% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE
16% PEROSSIDO DI CARBAMMIDE

Strisce **10 x 28 pz**



6% PEROSSIDO DI IDROGENO

Astucci **20 pz**



ASTUCCI PER MASCHERINE

MATERIALE MARKETING



BAG



BANNER UP
Sala d'attesa



ESPOSITORE
Sala d'attesa

MATERIALE MARKETING

BROCHURE PAZIENTI
Sala d'attesa

POSTER e VIDEO
Sala d'attesa

GRAFICHE
Sito e social

smilers®

ALLINEAMENTO PREMIUM PER UNO SBIANCAMENTO PREMIUM



Abbina lo sbiancamento White Dental Beauty con un trattamento ortodontico di qualità.

Con gli allineatori trasparenti Smilers® avrai l'opportunità di sbiancare i denti del tuo paziente durante il trattamento ortodontico.





DISPONIBILE PRESSO TUTTI I MIGLIORI DENTISTI

WHITEDENTALBEAUTY.COM

DISTRIBUITO DA:

