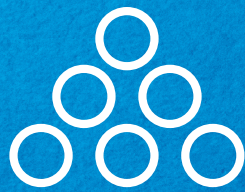




COOOOSÌ SUPER
CON **FUTAR**[®]

REGISTRAZIONE OCCLUSALE



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

FUTAR® – SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE!

Registrazione oclusale

La famiglia di prodotti **Futar®** comprende sei diversi materiali per la registrazione oclusale a base di silicone A, per l'esatta registrazione delle condizioni oclusali.

SUPER IN QUALITÀ E TECNOLOGIA AVANZATA

- “Made in Germany” con ricerca e sviluppo interni nonché produzione in Germania

SUPER GRAZIE ALLA VERSATILITÀ

- Potete scegliere tra durezza finali elevate e ultraelevate, nonché tra diversi tempi di lavorazione!

SUPER DA OLTRE 20 ANNI

- Affidatevi al marchio leader in Germania*!

**Non accettate compromessi nella
registrazione oclusale!**



FUTAR® – PANORAMICA DEI VANTAGGI

Futar® Cut & Trim Fast:

- Risparmio di danaro grazie all'impiego del **miscelatore più corto, di colore giallo** (fino a tre registrazioni in più per ogni cartuccia)
- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 35)
- Possibilità di lavorazione ideale con fresa e/o bisturi
- Scannerizzabile per l'impiego CAD/CAM nello studio!



Futar® D / Futar® D Fast:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Ottima lavorabilità con la fresa
- Disponibile anche come variante Fast: **per un maggiore comfort del paziente!**



La famiglia di prodotti Futar® offre ancora di più:

Futar® / Futar® Fast:

- Elevata durezza finale (Shore-A 90)
- Presa perfetta, flessibilità di lavorazione: estremamente facile da tagliare
- Disponibile anche come variante Fast: **per un maggiore comfort del paziente!**



Futar® D Slow:

- Durezza finale ultraelevata (Shore-D 43)
- Tempo di lavorazione extra-lungo per applicazioni complesse, ad es. per la registrazione oclusale miocentrica, il fissaggio di pilastri per impronta o la riproduzione individuale dei margini
- Impiego versatile anche nel laboratorio: come materiale isolante o per la realizzazione di segmenti modello



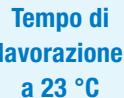








- Risultati esatti grazie alle eccellenti caratteristiche di fluidità
- La bassa elasticità riduce l'effetto gommoso nell'attribuzione dei modelli
- Le parti in eccesso possono essere comodamente rimosse

**APPLICAZIONE
SEMPLICE,
PULITA E
RAPIDA!**

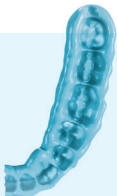








FUTAR® – LA FAMIGLIA AD ALTE PRESTAZIONI

Arcata dentale

 Materiale per registrazione occlusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
Futar®		30 s	90 s	2:00 min	A 90
Futar® D		30 s	90 s	2:00 min	D 43
Futar® D Slow		90 s	3:00 min	4:30 min	D 43

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

Segmento

 Materiale per registrazione occlusale	 Miscelazione	 Tempo di lavorazione a 23 °C	 Tempo di permanenza nel cavo orale	 Tempo di presa totale*	 Durezza (ca.) Shore
Futar® Fast		15 s	45 s	1:00 min	A 90
Futar® D Fast		15 s	45 s	1:00 min	D 43
Futar® Cut & Trim Fast		15 s	45 s	1:00 min	D 35

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

**REGISTRAZIONE
OCCLUSALE IN UN
SOLO MINUTO!**

FUTAR® – ASSORTIMENTO

Futar®	Futar® Fast	Futar® D	Futar® D Fast
Intro pack	Cartuccia da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde		
Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde		
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione, verde		

Futar® Cut & Trim Fast	
Intro pack	Cartuccia da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo
Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo
Bonus pack	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione, giallo

Futar® D Slow	
Normal pack	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com



062795_1519


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent