



*Il segreto*  
di un bel sorriso

## ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE



Inserire il gel all'interno della mascherina sbiancante personalizzata seguendo le istruzioni del dentista.



Spazzolare i denti, quindi inserire la mascherina. Picchiare delicatamente la mascherina per adattarne i bordi ai denti. Togliere la mascherina dopo 6-10 ore se si applica durante la notte, o dopo 1-6 ore se si applica durante il giorno.\*



Rimuovere il gel in eccesso con un dito o con uno spazzolino da denti morbido.



Sciquare abbondantemente facendo attenzione a non inghiottire l'acqua. In caso di notevole sensibilità, interrompere il trattamento e consultare il proprio dentista.



Pulire la mascherina con uno spazzolino morbido e con acqua corrente fredda.

### ISTRUZIONI DEL TUO DENTISTA

---



---



---



---



---



---

\*Il tuo dentista può darti istruzioni diverse dalle linee guida: segui sempre le sue istruzioni.