


IL LASER IN ODONTOIATRIA

FOCUS **MEDICINA ESTETICA**

MINIMAMENTE INVASIVA DEL VISO

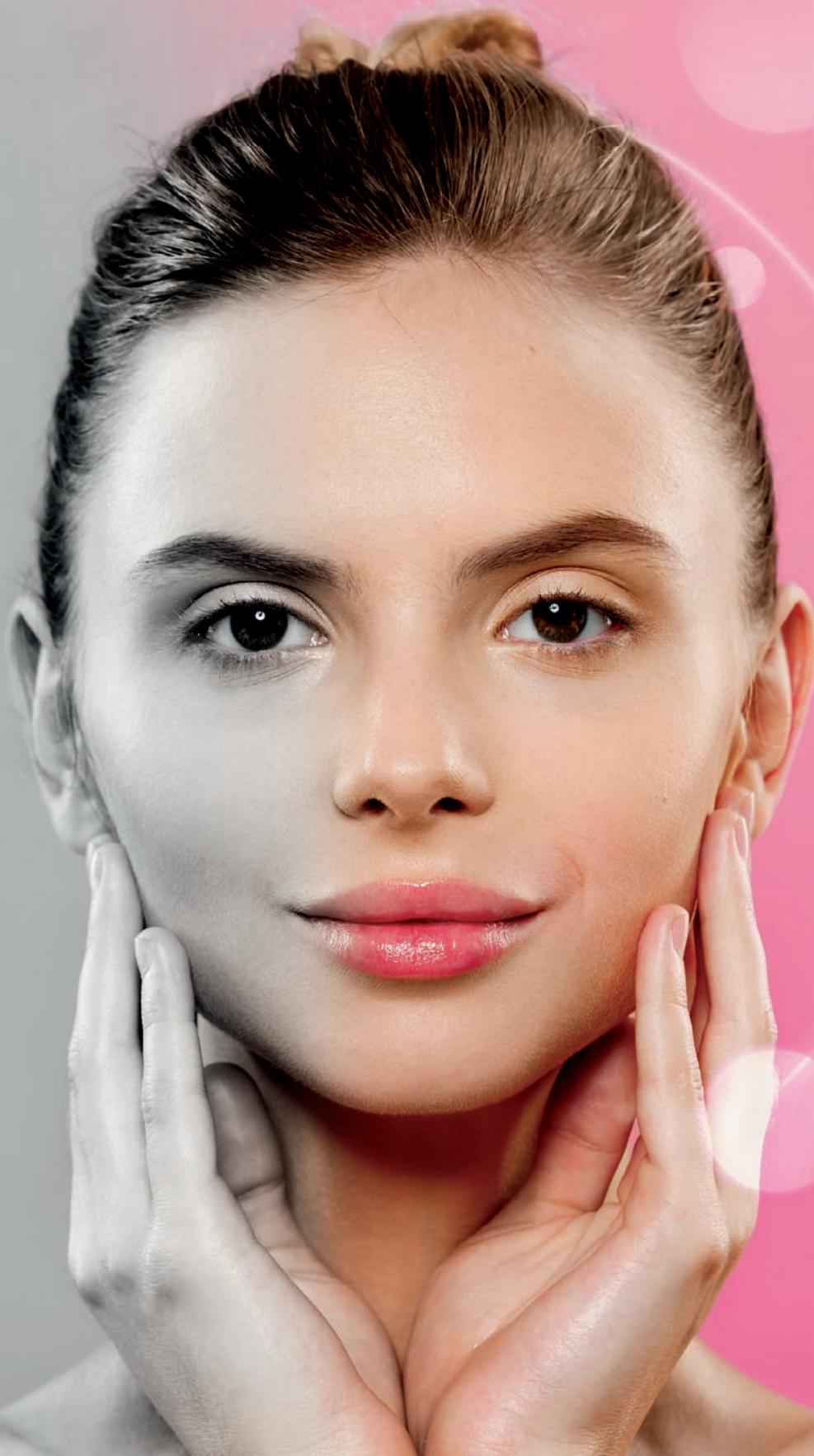

• doctor-smile.com



MEDICINA ESTETICA DEL VISO

SOMMARIO

ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA	4
LASER IN MEDICINA ESTETICA MINIMAMENTE INVASIVA	5
LASER A DIODI	6
CHIRURGIA DERMATOLOGICA	7
DEPIGMENTAZIONE CUTANEA	9
FOTORINGIOVANIMENTO CUTANEO	10
TERAPIA VASCOLARE	12
LASER A ERBIO (Er:YAG)	14
RESURFACING CUTANEO	16
TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE	17
DERMOCHIRURGIA	18

ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA

QUALI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA PUÒ ESEGUIRE L'ODONTOIATRA?

L'odontoiatra è autorizzato per legge a effettuare trattamenti non invasivi e minimamente invasivi nel campo della medicina estetica di tutto il viso (terzo superiore, terzo medio e terzo medio inferiore).

Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. Decreto Bollette), poi convertito in legge, ha introdotto un'importante novità sui trattamenti di medicina estetica eseguibili dall'odontoiatra.

L'art.15 ter (intitolato "Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica") ha modificato l'art.2 della Legge 24 luglio 1985, n. 409, integrando al secondo comma di quest'ultimo la frase che **permette all'odontoiatra di allargare il proprio campo di competenza nell'ambito estetico minimamente invasivo a tutto il volto e non più limitatamente al terzo inferiore, a completamento dei trattamenti odontoiatrici.**

L'art.15 ter recita infatti:

"4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato."

Si riporta di seguito l'articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 con evidenziata la frase aggiunta dal provvedimento.

"Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione e **possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.**"

Riferimenti normativi

Per ulteriori approfondimenti normativi rimandiamo alle leggi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale



Articolo 15 ter
D.L. 30 marzo 2023, n. 34



Articolo 2
L. 24 luglio 1985, n. 409

LASER IN MEDICINA ESTETICA MINIMAMENTE INVASIVA

MEDICINA ESTETICA “NON INVASIVA” E “MININVASIVA”: COSA SIGNIFICA?

“Non invasivo” e “mininvasivo” sono termini di uso comune in medicina per definire tecniche che, rispettivamente, **non alterano o alterano minimamente l'integrità anatomica e funzionale del tessuto trattato.**

L'utilizzo di tecniche non invasive o minimamente invasive permette al paziente di tornare alla normale vita quotidiana rapidamente e senza particolari disagi, a differenza di quanto accade con tecniche chirurgiche più invasive.

PERCHÉ IL LASER ODONTOIATRICO È UNA TECNOLOGIA MININVASIVA?

L'obiettivo primario dell'odontoiatria minimamente invasiva è rispettare la salute, la funzione e l'estetica di tutti i tessuti orali, prevenendo l'insorgere di malattie o intercettandone il decorso con una perdita minima di tessuto.

Il **LASER** agisce **selettivamente sul tessuto bersaglio** e garantisce la **massima tutela dei tessuti**: le specifiche lunghezze d'onda della luce laser interagiscono con le molecole di emoglobina, melanina e acqua, permettendo di eseguire **interventi precisi e sicuri**, che rispettano e preservano i tessuti sani.

Inoltre, il laser è una **tecnologia paziente-friendly**, in grado di rendere l'esperienza al riunito più confortevole e meno traumatica.

INTERVENTO LASER-ASSISTITO

NESSUN SANGUINAMENTO

PUNTI DI SUTURA NON NECESSARI

GUARIGIONE PER SECONDA INTENZIONE

RECUPERO POST-OPERATORIO PIÙ RAPIDO

RIDOTTA ASSUNZIONE DI FARMACI

Per questi motivi, nell'ottica minimamente invasiva, il laser diventa il **gold standard** per le moderne strutture odontoiatriche che vogliono offrire il miglior servizio di cura ai propri pazienti.

Wiser 3 è il laser a Diodi di Doctor Smile con 3 lunghezze d'onda miscelate per ottenere i migliori effetti terapeutici nella chirurgia dei tessuti molli, nella decontaminazione batterica, nella fotobiomodulazione e, grazie ai manipoli specifici e al pacchetto dedicato alla terapia cutanea, anche nella medicina estetica minimamente invasiva del viso.

LASER A DIODI

wiser



CHIRURGIA DERMATOLOGICA

DEPIGMENTAZIONE CUTANEA

FOTOBIORINGIOVANIMENTO CUTANEO

TERAPIA VASCOLARE

CHIRURGIA DERMATOLOGICA

GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

Rimozione di inestetismi e piccole lesioni benigne sul viso tramite vaporizzazione o escissione chirurgica.



APPLICAZIONI CLINICHE

- CHERATOSI
- FIBROMI PENDULI



VANTAGGI TRATTAMENTO LASER

- ✓ Intervento rapido e indolore
- ✓ Assenza di sangue
- ✓ Sutura non necessaria
- ✓ Guarigione per seconda intenzione
- ✓ Farmaci post-operatori solitamente non necessari

••••• RIMOZIONE FIBROMA



PRIMA



DOPO

LASER TERAPIA

L'EFFETTO SI VEDE



DEPIGMENTAZIONE CUTANEA

GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

Rimozione di macchie iperpigmentate sul viso tramite vaporizzazione del tessuto.



APPLICAZIONI CLINICHE

- MACCHIE SENILI
- MACCHIE DA IPER-ESPOSIZIONE SOLARE



VANTAGGI TRATTAMENTO LASER

- ✓ Scomparsa del rossore post-trattamento entro un paio di giorni
- ✓ Nella maggior parte dei casi richiede solo una semplice anestesia topica con prodotti a base di lidocaina

••••• *DEPIGMENTAZIONE DI MACCHIA SUL VISO*



PRIMA



DOPO

FOTOBIORINGIOVANIMENTO CUTANEO

Incremento della tonicità della pelle e del turgore dei tessuti del viso.



APPLICAZIONI CLINICHE

- LASSITÀ CUTANEE
- RUGHE SUPERFICIALI
- ACNE IN FASE ATTIVA



VANTAGGI TRATTAMENTO LASER

- ✓ Nessuna sutura
- ✓ Nessuna cicatrice
- ✓ Trattamento ben tollerato dal paziente
- ✓ Decorso post-operatorio semplice
- ✓ Risultati visibili in poche sedute

• TRATTAMENTO RUGHE PERIOCULARI



PRIMA



DOPO

TRATTAMENTO RUGHE PERIORALI



PRIMA



DOPO

TRATTAMENTO RUGHE GLABELLARI



PRIMA



DOPO

MANIPOLO REVIVE



GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

Manipolo specifico per interventi di biorigenerazione cutanea. La luce laser emessa dal manipolo innesca meccanismi riparativi a livello biologico, coadiuvando la normale rigenerazione del collagene.

TERAPIA VASCOLARE

Terapia di inestetismi estetici vascolari del volto.



APPLICAZIONI CLINICHE

- SPIDER NAEVI
- TELEANGECTASIE
- CAPILLARI



VANTAGGI TRATTAMENTO LASER

- ✓ Trattamento confortevole, rapido e indolore
- ✓ Massimo rispetto dei tessuti circostanti

• TRATTAMENTO TELEANGECTASIE



PRIMA



DOPO

TRATTAMENTO TELEANGECTASIE



PRIMA



DOPO

TRATTAMENTO CAPILLARE



PRIMA



DOPO

MANIPOLO VASCULATE



GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

Manipolo specifico per la terapia di inestetismi estetici vascolari del viso. Grazie all'affinità della luce laser con l'emoglobina, permette di intervenire selettivamente sul bersaglio e di risolvere rapidamente l'inestetismo.

Laser che combina la tecnologia dell'Erbio a quella del Diodo. Efficace nel trattamento dei tessuti duri e molli, nella chirurgia ossea e, con l'integrazione del software e dei manipoli dedicati, anche nella medicina estetica del viso.

LASER A ERBIO (Er:YAG)

pluser
kombi




RESURFACING CUTANEO

TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE

DERMOCHIRURGIA

pluser
LASER. FASTER. BETTER.

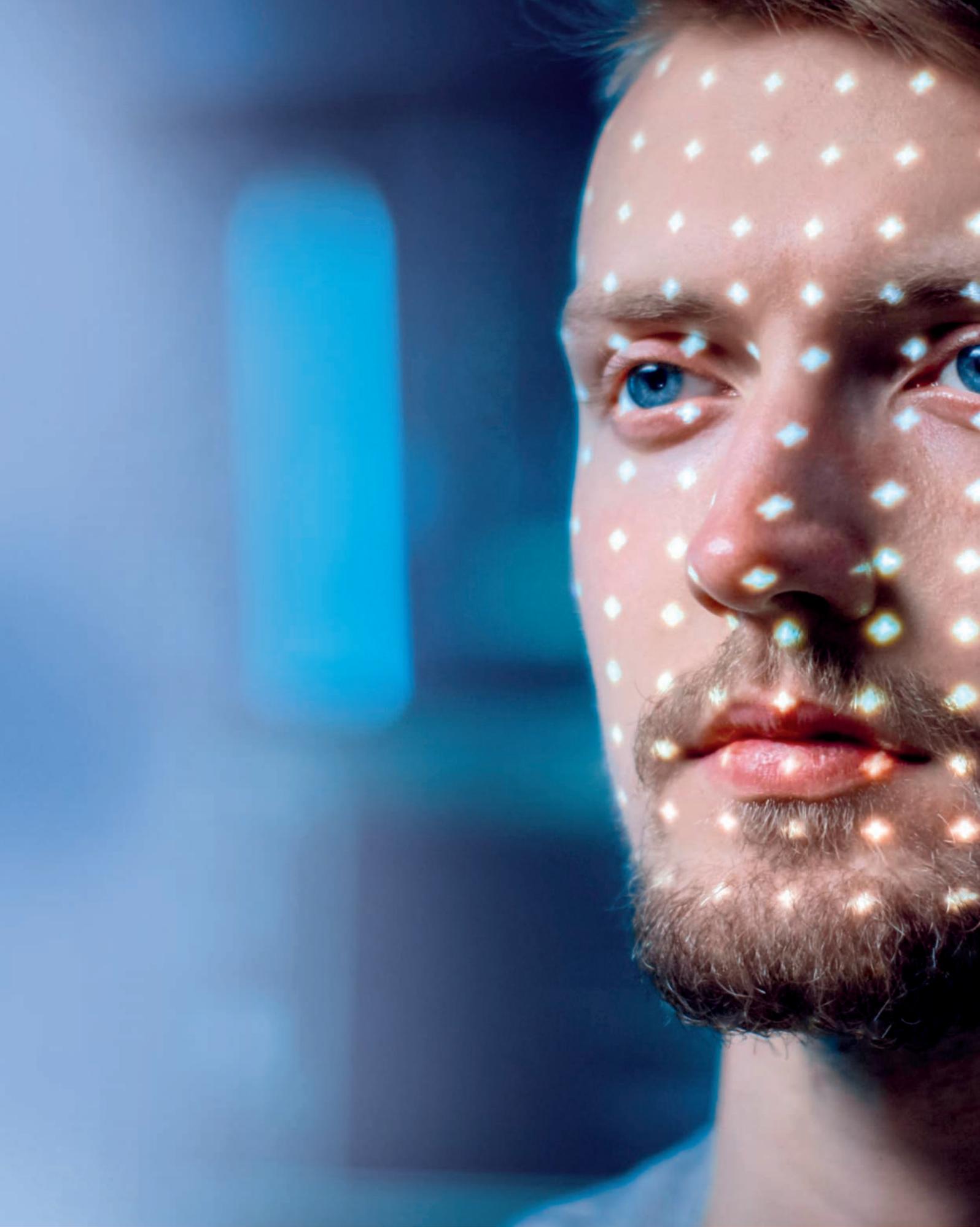

RESURFACING CUTANEO

Riduzione di rughe e lassità cutanee del volto. Il risultato è una pelle più tonica e un aspetto del viso più fresco, in poche sedute e con massimo comfort per il paziente.

RESURFACING FRAZIONATO



PRIMA



DOPO

MANIPOLO FRAZIONAL



GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

Ideale per il fotoringiovanimento cutaneo minimamente invasivo. Emette luce laser in modo puntiforme, generando delle micro-zone di stimolazione termica e di ablazione alternate a zone di tessuto non trattate.

TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE

Trattamento di lesioni cutanee come xantelasma, cicatrici atrofiche e ipertrofiche, cheratosi seborroiche, verruche piane, lentigo senile, grani di miglio, melasmi e nevi dermici.

❖❖❖ RIMOZIONE VERRUCA SEBORROICA



PRIMA



DOPO

❖❖❖ RIMOZIONE GRANI DI MIGLIO



PRIMA



DOPO

MANIPOLO FULL FIELD



Ideale per il trattamento di lesioni cutanee benigne del viso.

GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

DERMOCHIRURGIA

Rimozione a livello ambulatoriale di piccole lesioni cutanee sul viso come xantelasma, verruche seborroiche, fibromi, cisti ecc.

GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI COME FUNZIONA



SCAN ME!

•••• RIMOZIONE CONDILOMA



PRIMA



DOPO

•••• RIMOZIONE FIBROMA



PRIMA



DOPO

MANIPOLO BOOST



Con il manipolo Boost è possibile eseguire interventi di dermochirurgia mininvasiva grazie alla sua maneggevolezza, alla sua precisione di taglio e all'ausilio dello spray aria/acqua emesso dal laser che migliora la tollerabilità del trattamento.

LASER IN MEDICINA ESTETICA MINIMAMENTE INVASIVA DEL VISO

UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ
PER EVOLVERE LA TUA PROFESSIONE



- ✓ Incremento dei piani di trattamento
- ✓ Prestazioni terapeutiche ad alto valore percepito
- ✓ Aumento della redditività del tuo studio

**SCEGLI DOCTOR SMILE,
AUMENTA LE TERAPIE OFFERTE E
SODDISFA SEMPRE PIÙ PAZIENTI!**





20119171



 **LAMBDA SpA**

Via dell'Impresa | 36040 Brendola (VI) Italy

T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954

lambdaspa.com | info@lambdaspa.com



INFO

· doctor-smile.com

· info@doctor-smile.com