



Irrigazione

**Dominate
il flusso**

Le solite routine di risciacquo
non vi soddisfano?
Irrigate in modo più intelligente
con Dual Rinse HEDP.

Dual Rinse® HEDP

Innovazione nel cuore della valle svizzera della micro- tecnologia

Dal 1931, dal cuore della valle svizzera della microtecnologia, spingiamo i confini dell'endodonzia, combinando tecnologia e innovazione.

La nostra missione è fornire soluzioni che rispettino la complessa anatomia dei denti, migliorando l'efficienza del trattamento. Con innovazioni rivoluzionarie come XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, abbiamo trasformato la pratica dell'endodonzia, offrendo ai medici strumenti migliori per affrontare le sfide in sicurezza.


Irrigazione

Dominate il flusso

L'endodonzia è una disciplina che richiede precisione e fluidità del processo. Niente deve compromettere il ritmo dell'odontoiatra. A ogni irrigazione, variazione e pausa si perde la concentrazione. Dual Rinse HEDP viene in aiuto dei dentisti: in un unico passaggio, pulisce, dissolve e prepara il canale senza interrompere il flusso di lavoro. Meno siringhe. Meno transizioni. Solo puro movimento continuo dall'inizio alla fine. È giunto il momento che l'irrigazione segua il ritmo del dentista. Una capsula. Un protocollo. Una cosa in meno a cui pensare. Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.




Dual Rinse HEDP ridefinisce l'irrigazione endodontica, combinando le azioni chimiche essenziali in una soluzione continua, a tutto vantaggio di velocità, concentrazione e chiarezza clinica.

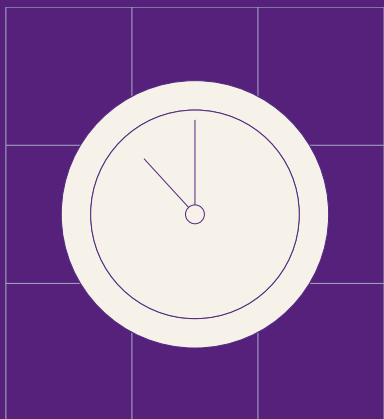

Gestione efficiente del tempo

Dual Rinse HEDP aiuta l'odontoiatra a risparmiare tempo e a ridurre i passaggi inutili, permettendo di mantenere la concentrazione sul trattamento, non sulle transizioni, e di migliorare sia le fasi di sagomatura che quelle di irrigazione.

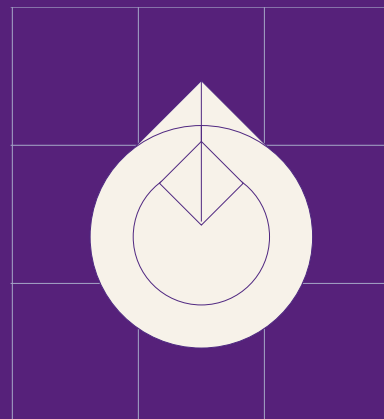

Azione chimica combinata

Con Dual Rinse HEDP, si ottengono una pulizia completa, dissoluzione, chelazione e disinfezione, senza alcuna interruzione del flusso di lavoro.



Gestione efficiente del tempo

Dual Rinse HEDP sostituisce gli irriganti in sequenza come EDTA e soluzioni saline con un'unica soluzione. Miscelato con NaOCl, supporta l'irrigazione continua attraverso la strumentazione canalare.

Riducendo i cambi di siringa ed eliminando le irrigazioni transizionali, si riduce prezioso tempo alla poltrona, soprattutto durante le procedure multi-canale o di ritrattamento, mantenendo la concentrazione sulla procedura.

Azione chimica combinata

Nei protocolli d'irrigazione convenzionali, l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e gli agenti chelanti o disinfettanti sono tipicamente usati separatamente a causa della loro incompatibilità chimica. Dual Rinse HEDP offre un approccio diverso. La sua formulazione è compatibile con NaOCl, permettendo di utilizzare contemporaneamente entrambe le soluzioni senza comprometterne i rispettivi effetti. Quest'azione combinata favorisce l'efficienza del processo d'irrigazione e aiuta a semplificare i protocolli clinici.

Dual Rinse HEDP offre una performance dalla duplice funzione, permettendo allo stesso tempo la rimozione del fango dentinale, la dissoluzione dei tessuti e la disinfezione. La sua formulazione mantiene l'attività chimica uniforme durante la strumentazione, riducendo la formazione di detriti e la variabilità della procedura. Con meno passaggi e variabili, l'odontoiatra è in grado di ottenere la detersione dei canali con maggiore facilità e predicibilità.



La semplicità è inutile senza prestazioni.

“Dual Rinse HEDP ridefinisce l'efficienza dell'irrigazione. Combinando rimozione del fango dentinale e dissoluzione del tessuto in un unico passaggio continuo, supera la procedura frammentata che per anni abbiamo considerato standard.

Il risultato è un canale più pulito, un workflow più fluido e una riduzione evidente del tempo alla poltrona, senza compromessi sulla disinfezione.

Porta sistematicità a un fase tradizionalmente difficile da standardizzare.”

Pr. Matthias Zehnder
DMD, PhD / Zurigo, Svizzera



Ti incuriosisce? Maggiori dettagli su Dual Rinse HEDP:

Soluzione d'irrigazione "tutto in uno"

Semplifica l'irrigazione continua, rimuovendo efficacemente i detriti e il fango dentinale senza richiedere ulteriore EDTA o risciacquo intermedio con acqua. Incrementa l'adesione alla dentina radicolare per una più efficace cura del canale radicolare.

Applicazione senza sforzi


Mescolare semplicemente la polvere con NaOCl, agitare e usare immediatamente nella siringa per un'irrigazione e un'attivazione rapide e semplici durante le procedure canalari.

Riduzione dei tempi di sagomatura

Riducendo significativamente i tempi di lavoro grazie alla chelazione simultanea unica, Dual Rinse HEDP semplifica la fase d'irrigazione e incrementa l'efficienza della strumentazione.

Minore sollecitazione dei file


Riducendo il carico torsionale durante la sagomatura, Dual Rinse HEDP contribuisce a proteggere gli strumenti rotanti, ottimizzando sia la sicurezza sia l'efficienza durante tutta la procedura.

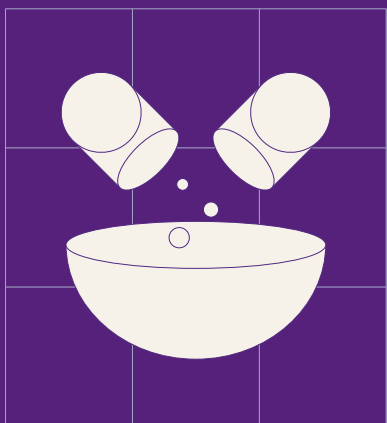

Aggiungi




Agita

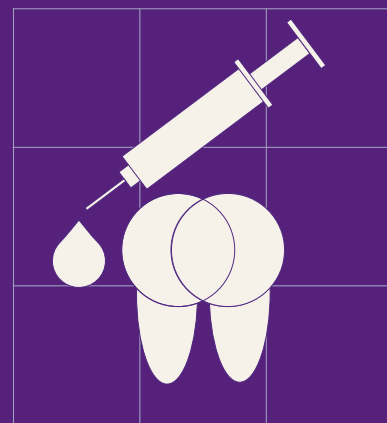

Applica

Dual Rinse
HEDP

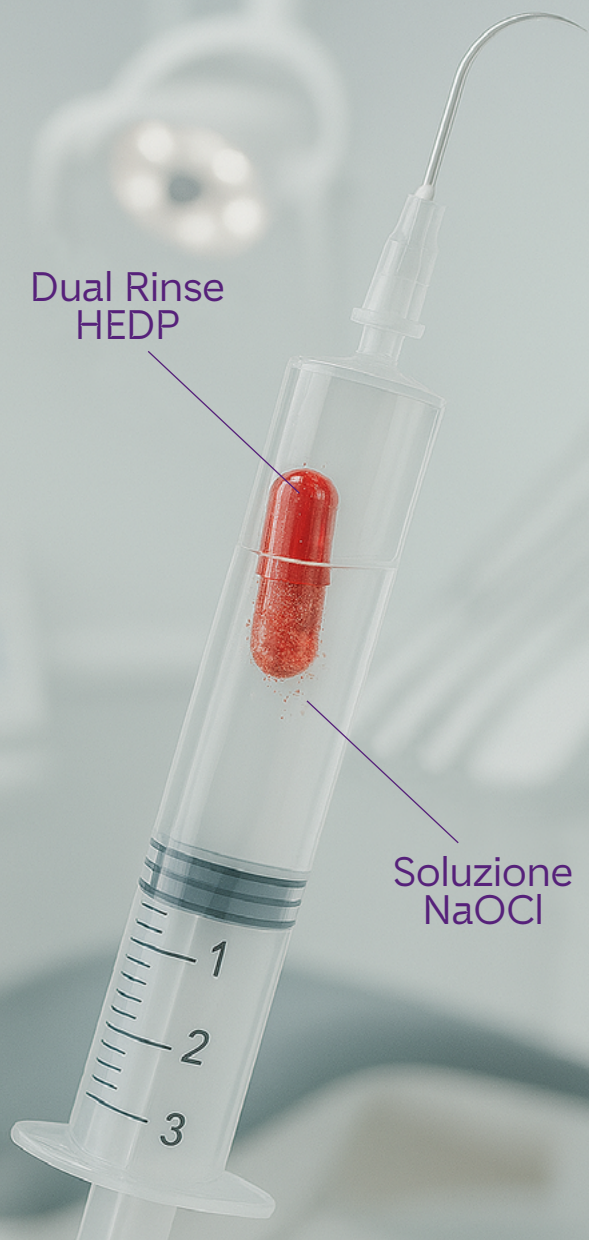

Soluzione
NaOCl

Idoneità comprovata

Un chelante delicato testato scientificamente e compatibile con NaOCl assicura prestazioni affidabili.

Referenze

Dual Rinse® HEDP

Flacone di capsule



10 capsule

cod. DT 10068006
cod. HSK 01 50563

30 capsule

cod. DT 10068007
cod. HSK 01 50564

Trova un rivenditore:



Empower Endo



Medium GmbH
Bühnenstrasse 12
8070 Wetzikon
Switzerland

FKG REF: 99.660.0001.A.IT_REV0_2025-08-15 - © FKG Dentaire Sàrl - Le immagini dei nostri prodotti non sono vincolanti

Benvenuti nel cuore della valle svizzera della microtecnologia.

Da quasi un secolo reinventiamo e mettiamo costantemente in discussione ciò che pensavamo di sapere.

Ci impegniamo a creare innovazioni che introducano nuovi modi di lavorare: più rispettosi, efficienti, agili, ergonomici e sicuri, al servizio delle nuove generazioni, promuovendo nuove visioni di vita, per noi, per voi e per i pazienti.

Abbracciamo il cambiamento che migliora le performance nell'endodonzia.

FKG | Change the game.

Entra nel nostro
universo rivoluzionario



Visita il nostro
sito Internet



www.fkg.ch

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Svizzera

+41 32 924 22 44
info@fkg.ch